

# Akutoł opatrunek ochronny w areozolu 60 ml

Rany cięte skóry, drobne rany, otarcia .

Elastyczny opatrunek ochronny o działaniu przeciwbakteryjnym, odporny na zmywanie, elastyczna warstwa ochronna preparatu nie krępuje swobody ruchu.

Zmywa się z powierzchni skóry alkoholem.

Nie jest przeznaczony do ran krwawiących.

Składniki:

Ethanolum denaturatum, Dimethyletherum, Copolymerum acrylatum, Dioxacyclopentanum, Nitrofuralum.

## **Sposób użycia:**

Powierzchnie rany dokładnie oczyścić i osuszyć. Pojemnik wstrząsnąć przed użyciem. Skierować otwór spustu na ranę i rozpylać cienką warstwę z odległości ok. 15 cm. Stosuje się miejscowo, zewnętrznie.

## **Opakowanie:**

Opakowanie zawiera 60 ml .

## **Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu

niedostępnym dla dzieci.

***Przeciwwskazania:***

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w okolicy oczu i błon śluzowych. Nie wdychać substancji lotnych podczas nakładania aerozolu. Zaprześcić stosowania w razie wywołanego preparatem podrażnienia skóry.