

Akutoł Spray do bezbolesnego usuwania plastrów 35ml

Spray Akutoł bez bólu pomaga łatwo usunąć plastry kryjące i transdermalne

Właściwości Akutoł Spray do bezbolesnego usuwania plastrów:

Akutoł do usuwania plastrów działa delikatnie na wrażliwą, popękaną lub naruszoną skórę. Miejsce po zdjętym plastrze pozostaje czyste i gotowe do przyklejenia nowego plastra.

Akutoł Spray do usuwania plastrów zapobiega bólowi podczas usuwania plastra. Preparat pomaga łatwo usunąć plastry kryjące i transdermalne, opatrunki przylepne i inne wyroby medyczne przyklejane do powierzchni ciała (plastry nikotynowe, plastry kinesiotapingowe na bazie akryłowego kleju, elektrody EKG)

jest bezpieczny i przyjazny dla skóry

odparowuje w całości

nie wpływa na proces gojenia rany i nie jest wchłaniany przez ranę

działa delikatnie także na wrażliwą i bardzo suchą, popękaną lub naruszoną skórę

leczone miejsce pozostaje czyste i przygotowane do przyklejenia nowego plastra

Polecany dla:

- dzieci i dorosłych

- osób stosujących plastry transdermalne (przeciwbólowe, hormonalne, nikotynowe, itp.)

- pacjentów noszących specjalistyczne opatrunki (np. stomijne)

Jak stosować spray do bezbolesnego usuwania plastrów Akutoł?

Skóra w obrębie plastra powinna być czysta i sucha przed użyciem sprayu. Plaster należy spryskać sprayem z odległości 10-15 cm od skóry, w celu jego nawilżenia. Odczekać 10-15 sekund i zerwać plaster szybkim ruchem. W przypadku plastrów nieprzepuszczalnych należy spryskać róg plastra i po kilku sekundach podnieść krawędź plastra. Następnie ponownie

spryskać i zdejmować plaster partiami do całkowitego usunięcia.

Spray do usuwania plastrów może stosować każdy, również dzieci i osoby chorujące na cukrzycę. Stosowanie w przypadku kobiet ciężarnych i karmiących piersią należy skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku reakcji alergicznej na któryś ze składników preparatu.

W przypadku ran przewlekłych z powodów higienicznych preparat powinien stosować tylko jeden pacjent.

Składniki Akutol Spray do bezbolesnego usuwania plastrów:

Hexamethyldisiloxane, Butane, Propane, Isobutane, Cyclopentasiloxane.

Podmiot odpowiedzialny:

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.