

BLANX 03X Paski wybielające z aktywnym tlenem 10szt.

03X uwalnia moc tlenu, który pomaga usuwać przebarwienia i uzyskać intensywnie biały uśmiech. Te wyjątkowo cienkie paski są elastyczne i przezroczyste – idealnie przylegają do zębów. Odcienie bieli, które można uzyskać, odnoszą się do wskaźnika VITA CLASSICAL A1-D4 – powszechnie znanej skali używanej przez stomatologów do określania koloru zębów. Innowacyjna formuła, która nie zawiera nadtlenków, jest nieabrazyjna, a także delikatna dla dziąseł i szkliwa zębów.

03X

Uwalnia moc tlenu i pomaga usuwać przebarwienia, aby uzyskać lepszy efekt wybielania.

POROST ISLANDZKI

Naturalny składnik aktywny zwalczający kamień nazębny i naturalnie wybielający zęby.

Sposób użycia:

Nałóż jeden pasek na górny łuk zębowy i jeden pasek na dolny łuk zębowy i dociśnij, aby zapewnić dobry kontakt z zębami. Pozostaw paski na zębach przez 10 minut. Następnie usuń paski z zębów i przepłucz jamę ustną wodą, aby usunąć pozostały żel.

Zestaw zawiera:

5-dniowy zapas kuracji

5 foliowych opakowań z 2 gotowymi do użycia paskami (10pasków).

Wskazówki:

Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu wybielającego, przed każdym użyciem pasków umyj zęby pastą do zębów BlanX 03X lub inną pastą z linii BlanX. Nie jedz i nie pij podczas aplikacji oraz 15 minut po niej.

Przeciwwskazania:

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 14 roku życia oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie należy stosować na implanty, licówki ani korony zębowe.

Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze pokojowej między 15° to 25°C(59°-77°F). Trzymaj z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.