

Braun ExactFit 1 BUA5000 automatyczny ciśnieniomierz naramienny z mankietem 22-42 cm czarno-biały

Braun ExactFit 1 BUA5000 automatyczny ciśnieniomierz naramienny

Braun ExactFit™ 1 BUA5000 to łatwy w obsłudze, precyzyjny ciśnieniomierz naramienny w czarno-białym kolorze. Gwarantuje profesjonalną, klinicznie udowodnioną dokładność, zgodną z normami ESH (Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego). Dokładność pomiaru jest porównywalna z dokładnością pomiarów dokonywanych przez wykwalifikowany personel medyczny metodą osłuchową za pomocą sphygmomanometrów mechanicznych.

Łatwy pomiar ciśnienia krwi z Braun ExactFit™ 1

Wykonanie dokładnego pomiaru ciśnienia za pomocą Braun ExactFit™ 1 BUA5000 jest niezwykle proste – wymaga przyciśnięcia tylko jednego przycisku, który służy zarówno do włączania i wyłączania urządzenia, jak i do rozpoczęcia pomiaru. Urządzenie jest wyposażone w duży ekran LCD, który wyświetla wyniki w czytelny sposób, nawet z pewnej odległości. Świetnie sprawdzi się u osób ze słabszym wzrokiem. Na ekranie można odczytać wartość skurczową, rozkurczową i tętno.

Do ciśnieniomierza dołączony jest elastyczny mankiet w uniwersalnym rozmiarze, który pasuje na ramię o obwodzie od 22 do 42 cm. Mankiet jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają wygodę i trwałość podczas użytkowania. Na mankiecie znajduje się instrukcja właściwego zakładania.

Braun ExactFit™ 1 posiada funkcję pamięci ostatniego pomiaru, która ułatwia codzienne monitorowanie ciśnienia. Dodatkowo,

aby lepiej kontrolować swoje ciśnienie krwi na przestrzeni czasu, istnieje możliwość pobrania na telefon aplikacji Braun Healthy Heart, w której można ręcznie wprowadzać dane z każdego pomiaru.

Braun ExactFit™ 1 to świetna propozycja dla osób, poszukujących prostego w obsłudze, precyzyjnego urządzenia pomiaru ciśnienia krwi i tętna.

Zastosowanie

Ciśnieniomierz z certyfikatem ESH do pomiaru górnego (skurczowego) i dolnego (rozkurczowego) ciśnienia krwi oraz pulsu.

Do użytku w warunkach domowych.

Sposób użycia

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie ciśnieniomierzem naramiennym Braun ExactFit™ 1?

Podłącz mankiet do ciśnieniomierza.

Wsuń mankiet na ramię. Dolna krawędź mankieta powinna znajdować się około 2-3 cm nad łokciem. Przewód powinien być poprowadzony nad tętnicą ramienną po wewnętrznej stronie ramienia.

Pociągnij mankiet, aby jego górna krawędź i dolna krawędź były zaciśnięte wokół ramienia. Mankiet jest założony poprawnie, jeśli rzep znajduje się na zewnątrz mankieta, a metalowy pierścień nie dotyka skóry.

Po prawidłowym założeniu mankieta dociśnij rzep po stronie mankieta wykonanej z materiału z meszkiem.

Usiąść na krześle i położyć ramię na stole, tak aby mankiet znajdował się na poziomie serca. Stopy oprzyj płasko na podłodze. Podczas pomiaru nie ruszaj się, nie rozmawiaj i nie poruszaj aparatem, ponieważ zakłóciłoby to prawidłowość pomiaru.

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pomiar. Pomiar rozpocznie się automatycznie: mankiet najpierw napełni się powietrzem, a następnie opróżni. Na koniec pomiaru zostaną wyemitowane 2 końcowe sygnały akustyczne i pojawi się odczyt:

wartość górna (ciśnienie skurczowe), wartość dolna (ciśnienie rozkurczowe) i tętno.

Aby wyłączyć aparat, naciśnij przycisk zasilania. W przeciwnym razie ciśnieniomierz wyłączy się automatycznie po upływie 1 minuty.

Wynik pomiaru zostanie zapisany w pamięci.

W razie konieczności przerwania pomiaru naciśnij przycisk zasilania w dowolnej chwili. Aparat natychmiast przerwie pomiar, obniży ciśnienie w mankiecie i automatycznie się wyłączy.

Cechy produktu

pomiar na ramieniu,

kompaktowe rozmiary,

łatwa, intuicyjna obsługa jednym przyciskiem,

duży, czytelny, cyfrowy wyświetlacz,

klinicznie potwierdzona profesjonalna dokładność,

pamięć 1 pomiaru,

automatyczne wyłączenie po 1 minucie bezczynności,

kolor: czarno-biały,

uniwersalny rozmiar mankietu (22–42 cm),

instrukcja pomiaru ciśnienia wydrukowana bezpośrednio na mankiecie.

Specyfikacja techniczna

model: BUA5000EU / MY20;