

Corega Max Osłona krem mocujący do protez zębowych 40 g

Opis produktu

Corega max osłona zapewnia zaawansowaną osłonę blokującą przedostanie się drobinek jedzenia pod powierzchnię protezy oraz mocując ją na cały dzień.

Zastosowanie

Dla osób dorosłych do mocowania protez zębowych.

Sposób użycia

Sposób aplikacji kremu: wyczyścić i osuszyć protezę. Nanieść niewielką ilość kremu Corega Ochrona Dziąseł w postaci krótkich pasków (patrz rysunki) w pewnej odległości od krawędzi protezy. Przed założeniem protezy przepłukać jamę ustną. Założyć i docisnąć protezę, a następnie na kilka sekund przygryźć, by uzyskać stabilne umocowanie. Nie stosować częściej niż raz dziennie.

Sposób zdejmowania: przepłukać jamę ustną wodą. Powoli wyjąć protezę, poruszając nią na boki. Usunąć pozostałości kremu mocującego z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki. Dokładnie oczyścić protezę z użyciem środka czyszczącego Corega.

Składniki

Calcium/sodium PVM/MA Co-polymer, petrolatum, cellulose gum.

Ważne wskazówki

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie,
należy skonsultować się z lekarzem.

W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy
natychmiast przerwać stosowanie pchorunku.

Ostrzeżenia

U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na
produkt.

Producent

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o.,
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa