

Corega Power Max Mocowanie + Komfort krem mocujący do protez zębowych 40 g

COREGA POWER MAX Mocowanie + Komfort – krem mocujący do protez o neutralnym smaku

Właściwości: Corega Power Max Mocowanie + Komfort to krem mocujący do protez zębowych, bez dodatku aromatów i sztucznych barwników, o smaku neutralnym. Tubka wyposażona jest w precyzyjny aplikator. Tekturowe opakowanie z recyklingu, które podlega dalszemu recyklingowi.

Działanie: Najsilniejsze mocowanie: najsilniejsza metoda mocowania protez wśród produktów linii Corega – odpowiednia do protez częściowych i całkowitych.

Komfort: redukuje nacisk protezy.

Precyzyjna aplikacja: precyzyjny aplikator umożliwiający równe nałożenie produktu pomaga nanieść jego odpowiednią ilość.

Jedzenie bez obaw: mocowanie do 12 godzin.

Sposób użycia: Oczyszczyć i osuszyć protezę i wypłucz usta. Następnie postępuj zgodnie z ilustracjami na opakowaniu, by w odpowiedni sposób nanieść produkt na protezę częściową lub całkowitą. Włóż protezę i mocno ją dociśnij. Przygryź ją na kilka sekund i gotowe. Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz usta wodą, a następnie poruszaj protezą.