

Corega TABS – 8tabletek do czyszczenia protez

Tabletki czyszczące Corega Tabs Bio Formula

Właściwości:

Tabletki Corega Tabs Bio Formula, dzięki formule czyszczącej „micro clean”, znacznie skuteczniej niszczą szkodliwe bakterie i grzyby znajdujące się na protezie niż zwykła pasta do zębów*.

Zwykłe pasty do zębów mogą uszkodzić protezę zębową, ponieważ zarysowują jej powierzchnię. Zarysowania sprzyjają namnażaniu się bakterii. Tabletki Corega Tabs Bio Formula czyszczą protezę zębową bez zarysowań, dzięki czemu proteza pozostaje czysta, wolna od przebarwień oraz gładka.

Jednocześnie niszczą 99,9% bakterii odpowiedzialnych za przykry zapach.

Regularne stosowanie tabletek do czyszczenia protez zębowych Corega Tabs zapewnia specjalistyczne, dokładne oczyszczenie protezy, jak też świeżość każdego dnia.

*podczas badań laboratoryjnych

Wieloskładnikowy system czyszczący obecny w tabletkach Corega czyści protezy usuwając płytkę bakteryjną i przebarwienia oraz niszcząc bakterie odpowiedzialne za przykry zapach. Utleniacze obecne w formule czyszczącej (nadtlenek sodu, nadwęglan sodu i mononadsiarczan potasu) to wybielacze, które usuwają powstające każdego dnia przebarwienia. Ponadto, skutecznie niszczą bakterie i inne drobnoustroje, które zasiedlają Twoją protezę zębową.

Detergent (laurylosiarczanooctan sodu) umożliwia czyszczenie protezy poprzez ułatwianie usuwania pozostałości przebarwień z ich powierzchni. Składniki musujące (wodorowęglan sodu i kwas cytrynowy) pomagają tabletkę się rozpuścić i rozprowadzić

powyższe składniki, umożliwiając działanie czyszczące. Powyższe właściwości uzupełnia szczotkowanie protezy roztworem czyszczącym po namoczeniu.

Sposób użycia:

Wrzuć jedną tabletkę Corega do naczynia z ciepłą (nie gorącą) wodą. Ilość wody powinna wystarczyć do całkowitego zanurzenia całej protezy na czas podany w instrukcji na opakowaniu.

Po zanurzeniu w roztworze tabletek na 3-5 minut, wyczyść protezę zębową szczoteczką z użyciem roztworu.

Dokładnie opłucz protezę pod bieżącą wodą. Wylej pozostały roztwór natychmiast po użyciu.

Tabletki do czyszczenia protez zębowych Corega są przeznaczone do codziennego stosowania.

Podmiot odpowiedzialny: PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA

CE 1639

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

Wyrób medyczny – posiada oznakowanie CE.

Posiada deklarację zgodności UE

Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.