

Desnoran spray do nosa przeciw chrapaniu 30 ml

Opis produktu

Wskazania:

Desnoran został stworzony z myślą o ludziach, którzy na co dzień borykają się z dolegliwym problemem chrapania.

Właściwości:

Najczęstszą przyczyną chrapania jest zbyt silny rozkurcz mięśni okolic gardła występujący w czasie snu. W konsekwencji tego wejście do gardła ulega zwężeniu utrudniając przepływ powietrza. Aby zapewnić płucom właściwą objętość powietrza zwiększeniu ulega szybkość jego przepływu przez gardło. Wzrasta ciśnienie wywierane na gardło, co wywołuje drganie języczka i podniebienia miękkiego. Wibracje te odpowiadają za odgłos chrapania.

Desnoran usuwa przyczynę chrapania. To wyrób medyczny w postaci sprayu przeznaczonego do podawania do nosa. Desnoran nawilża i zmiękcza błonę śluzową oraz poprawia napięcie tkanek gardła. Dzięki takiemu działaniu wyrób medyczny Desnoran ułatwia przepływ powietrza przez drogi oddechowe niwelując wibracje i usuwając odgłos chrapania.

Optymalne działanie Desnoranu możliwe jest dzięki unikalnej konstrukcji aplikatora:

- systemowi „upside-down”, który umożliwia aplikację środka w każdej pozycji ciała oraz
- systemowi „jet-stream”, który zapewnia dozowanie środka pod wysokim ciśnieniem i dotarcie substancji w miejsce docelowe.

Sposób użycia:

Wyrób należy stosować regularnie, co wieczór przed pójściem spać.

1. Przed zastosowaniem wyrobu oczyścić nos.
2. Przechylić głowę do tyłu (najlepiej podczas leżenia).
3. Do każdego otworu nosowego aplikować 4 do 6 dawek.

Aby uzyskać optymalny efekt wyrób musi spłynąć i całkowicie pokryć błonę śluzową gardła. Nie należy przyjmować pokarmów i napojów bezpośrednio po użyciu wyrobu.

W niektórych przypadkach zamierzony efekt nie jest osiągnięty po pierwszym zastosowaniu.

Składniki:

Woda oczyszczona, sodu chlorek, glicerol, polisorbat 80, sorbinian potasu, disodu edytynian.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.