

Domowe Laboratorium LH test owulacyjny 5 sztuk

LH Test owulacyjny domowy test do wykrywania dni płodnych –
5sztuk Domowe Laboratorium

OPIS

Test LH to szybki test paskowy do wykrywania stężenia ludzkiego hormonu LH równego lub większego niż 40 mIU/ml. Wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu LH w moczu kobiety. Pakiet LH Test zawiera 7 pasków testowych, za pomocą których można wyznaczyć najbardziej płodne dni cyklu miesięcznego. Wykonanie testu LH z testem jest proste: zanurzasz pasek testowy w moczu i odczytujesz wynik, który pojawia się jako kolorowa linia. Jeśli wynik testu był pozytywny, owulacja najprawdopodobniej nastąpi w ciągu 24-36 godzin.

SKŁADNIKI

Otwórz foliową kopertę i wyjmij pasek testowy, trzymając tylko jego górną część i nie dotykając reszty testu. Środek osuszający, który również znajduje się w kopercie, należy wyrzucić do kosza.

Włóż pasek testowy do wcześniej przygotowanej próbki moczu na odpowiednią głębokość (do tzw. linii MAX). Po 10-15 sekundach wyjmij pasek testowy z pojemnika i umieść go na poziomej płaskiej powierzchni.

Monitoruj ruch próbki moczu przez strefę testową (T) i strefę kontrolną (C) na pasku testowym. Poczekać, aż pojawią się na nim kolorowe paski. – Wynik testu można odczytać po 5 minutach od zanurzenia paska w próbce moczu.

PRODUCENT

Hydrex Diagnostyka Sp. z oo o. Sp. k.

ul. Tomasza Zana 4

04-313 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany stanowi zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia.