

Help4Skin Gojenie oparzeń żel hydrokoloidowy 75 g

Opis produktu

Help4Skin gojenie oparzeń jest inteligentnym hydrożelem, który reguluje poziom wilgotności rany. Nie tylko zabezpiecza ją przed wysychaniem lecz także absorbuje wilgoć, gdy staje się zbyt wilgotna. Help4Skin gojenie oparzeń natychmiast chłodzi i koi oparzone miejsce, dzięki wybranym substancjom pomocniczym podtrzymującym aktywność hydrożelu. Produkt natychmiastowo zmniejsza ból. Zapewnia efekt chłodzenia. Przyspiesza gojenie. Pomaga uniknąć infekcji. Zmniejsza ryzyko powstawania blizn i strupów.

Zastosowanie

Oparzenia, oparzenia słoneczne, otarcia i pęknięcia skóry.

Sposób użycia

Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu na ranę.

Powierzchowne oparzenia: natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii nie zaleca się stosowania zimnej wody raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać jeśli to konieczne stosować opatrunek.

Oparzenia słoneczne: oczyścić oparzone miejsce raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać. Jeśli to konieczne stosować opatrunek.

Drobne rany: oczyścić i zdezynfekować ranę jeżeli to konieczne ostrożnie osuszyć sterylną gazą raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać. Jeśli to konieczne stosować opatrunek .

Składniki

Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

Przeciwwskazania

Nie stosować na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.

Ważne wskazówki

Stosować u dzieci powyżej 2 lat.

Nie zawiera parabenów.

Do stosowania zewnętrznego.

Przechowywać w temperaturze między 5 a 25 stopni Celsjusza.

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Oystershell NV,
Nijverheidsweg 10,

9820 Merelbeke,
Belgia.

Dystrybutor

ZF Polpharma S.A.,
83-200 Starogard Gdański,
ul. Pelpińska 19