

Help4Skin Gojenie Ran żel hydrokoloïdowy – 20g

Opis produktu

Help4Skin Gojenie Ran to wyrób medyczny, który w sposób pośredni przyspiesza gojenie ran poprzez regulację ich mikrośrodowiska. Produkt zawiera karbomer stabilizowany karnozyną, peptydem występującym naturalnie w skórze. W przypadku ran suchych takich jak otarcia i rany chirurgiczne ma działanie okluzyjne: hamuje parowanie i zmniejsza utratę płynu przez naskórek. W przypadku ran wilgotnych, sączących pochłania nadmiar płynu, schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z plastrem i/lub bandażem.

Zastosowanie

Rany, skaleczenia, zadrapania, otarcia i pęknięcia skóry.

Sposób użycia

Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu na ranę.

Zamknięte rany: oczyścić i zdezynfekować leczony obszar. Nałożyć preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora. W razie potrzeby założyć bandaż lub plaster.

Otwarte rany: oczyścić i zdezynfekować leczony obszar. Dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą. Nałożyć grubą warstwę preparatu (0,5 – 0,75 cm) na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora. Założyć plaster lub bandaż. Zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie. Zmniejszyć

ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup.
W przypadku oparzeń należy najpierw przemyć wodą, następnie przejść do następnych punktów.

Składniki

Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

Przeciwwskazania

Nie stosować na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.

Ważne wskazówki

Stosować u dzieci powyżej 2 lat.

Nie zawiera parabenów.

Do stosowania zewnętrznego.

Przechowywać w temperaturze między 5 a 25 stopni Celsjusza.

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Do użytku zewnętrznego.

Producent

Oystershell NV

Nijverheidsweg 10

9820 Merelbeke

Belgia.

Dystrybutor

ZF Polpharma S.A.

83-200 Starogard Gdański

ul. Pelpińska 19.