

Home Check Test ciążowy Bejbi Duo płytkowy + strumieniowy -2sztuki

Home Check Test ciążowy Bejbi Duo płytkowy + strumieniowy -2sztuki

Opakowanie zawiera 1 test ciążowy „Bejbi” płytkowy i 1 test ciążowy „Bejbi Ultraczuły” strumieniowy.

Test ciążowy do samodzielnego stosowania.

Test „Bejbi” płytkowy:

Czułość analityczna: 25 mIU/ml

Czułość diagnostyczna = 100%

Swoistość diagnostyczna = 100%

Dokładność ponad 99%

Test „Bejbi Ultraczuły” strumieniowy:

Czułość analityczna: 10 mIU/ml

Czułość diagnostyczna = 100%

Swoistość diagnostyczna = 100%

Dokładność ponad 99%

Czułość i swoistość obu testów została sprawdzona na 900 próbkach zgodnie z międzynarodową normą WH04.

Do czego służy badanie hormonu HCG?

Testy ciążowy „Bejbi” płytkowy i „Bejbi Ultraczuły” strumieniowy służą do szybkiego, jakościowego oznaczenia hormonu HCG w próbce moczu, w celu wczesnego wykrywania ciąży.

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG), to hormon glikoproteinowy wydzielany przez rozwijające się łożysko wkrótce po zapłodnieniu. Stężenie HCG stale rośnie w gwałtownym tempie, często przekraczając 100 mIU/ml w okresie przypadającym na pierwszą brakującą miesiączkę. Wystąpienie

HCG wkrótce po zapłodnieniu i późniejszy wzrost stężenia w początkowym okresie ciąży powoduje, że jest to doskonały wskaźnik do wczesnego wykrywania ciąży.

Jak działają testy ciążowe?

Test ciążowy „Bejbi” płytkowy to urządzenie immunochromatograficzne, które wykrywa hormon hCG w moczu poprzez specjalne sprzężone ze złotem przeciwciała monoklonalne zawarte w reaktywnym pasku.

Test ciążowy „Bejbi Ultraczuły” strumieniowy to urządzenie immunochromatograficzne, które wykrywa hormon hCG w moczu poprzez specjalne sprzężone ze złotem przeciwciała monoklonalne zawarte w reaktywnym pasku.

Test można przeprowadzić po 6-ciu dniach od momentu zapłodnienia, chociaż wskazane jest wykonanie go dopiero dzień po terminie spodziewanej miesiączki, o dowolnej porze dnia. Zaleca się użycie pierwszego moczu rano (eliminując pierwszy strumień), jako bardziej skoncentrowanego.

Jak wykonać test ciążowy?

Test ciążowy „Bejbi” płytkowy

1. Pobierz mocz do zakraplacza.
2. Wprowadź 3 krople moczu na płytkę testową.
3. Wynik odczytaj w czasie do 5 min.

Test ciążowy „Bejbi Ultraczuły” strumieniowy

1. Umieść końcówkę testu bezpośrednio pod strumieniem moczu przez minimum 3 sekundy.
2. Wynik odczytaj w czasie do 5 min.

Zawartość opakowania:

- 2 kopertki foliowe zawierające po 1 teście
- Instrukcja użytkowania wyrobu

Podmiot odpowiedzialny: MILAPHARM SP. Z O.O.

CE 0197

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

Wyrób medyczny – posiada oznakowanie CE.

Posiada deklarację zgodności UE

Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.