

Test PSA na prostatę domowy test do wykrywania antygenu PSA we krwi – 1sztuka Domowe Laboratorium

Opis produktu

PSA Test jest szybkim testem, który w warunkach domowych w prosty i łatwy sposób pozwala określić czy poziom PSA we krwi jest prawidłowy, czy powyżej normy. PSA jest skrótem od angielskiej nazwy “Prostate Specific Antigen” i oznacza antygen swoisty dla prostaty. U mężczyzn ze zmienionymi chorobowo komórkami prostaty do krwiobiegu przedostaje się znacznie więcej antygenu PSA.

Za prawidłowe uważa się stężenie PSA we krwi w zakresie 0 ng/ml do 4 ng/ml. Przekroczenie wartości prawidłowych PSA wskazuje na patologię prostaty (łagodny przerost, zapalenie, rak, itp.) i powinno być wskazaniem do dalszej diagnostyki w tym kierunku.

Badanie PSA powinno być przeprowadzane co roku u mężczyzn po 50. roku życia.

Sposób użycia

Tuż przed wykonaniem badania dokładnie umyć ręce mydłem, wypłukać wodą i wysuszyć.

Rozerwać foliową kopertkę wzdłuż nacięcia i wyjąć z niej tylko płytkę testową i plastikową pipetkę. Środek pochłaniający wilgoć wyrzucić.

Wziąć do ręki nakłuwacz i wcisnąć do środka pomarańczowy element aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia

świadczącego o tym, że nakłuwacz jest aktywny.

Usunąć pomarańczowy element "wykręcając" go w lewą lub w prawą stronę .

Zdezynfekować opuszkę palca serdecznego lub środkowego wacikiem nasączonym spirytusem. Zwiększyć ukrwienie opuszki przez masowanie palca w kierunku od nasady palca do jego końca.

Przyłożyć nakłuwacz do zdezynfekowanej opuszki palca tak, aby ściśle przylegał i nacisnąć przycisk zwalniający sprężynę.

Ostrze automatycznie i w bezpieczny sposób schowa się do obudowy nakłuwacza.

Lekko pomasować palec, aby uzyskać większą kroplę krwi.

Trzymając pipetkę w pozycji poziomej, zbliżyć jej końcówkę do kropli krwi. Nie ścisnąć przy tym ani samej pipetki, ani opuszki palca. Pod wpływem sił kapilarnych krew zacznie wpływać do pipetki. Pipetkę trzymać przytkniętą do kropli tak długo, aż krew wypełni ją do czarnej kreski. Jeśli jest taka potrzeba, jeszcze raz pomasować palec. Unikać pęcherzyków powietrza.

Krew z pipetki wprowadzić do okrągłego okienka na płytce testowej.

Odczekać aż krew zostanie całkowicie wchłonięta i nie zwlekając wprowadzić do tego samego okienka 4-5 pełnych kropli diluentu.

Odczytać wynik testu po 10 minutach. Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 15 minut.

Ważne wskazówki

Test przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Opakowanie PSA Test należy przechowywać w temperaturze 4 – 30°C. Nie zamrażać.

Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.

Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawartość opakowania

- 1 aluminiowa szczelnie zamknięta kopertka, w której znajduje się: 1 płytka testowa, 1 plastikowa pipetka i 1 środek pochłaniający wilgoć,
- 1 pojemnik z zakraplaczem zawierający 1ml diluentu,
- 1 sterylny lancet do nakłucia palca.

Producent

Veda Lab.

Rue de l'Expansion-ZAT du Lomdeau,
Cerise-BP 181,
61006 Alencon Cedex, Francja.

Dystrybutor

Hydrex Diagnostics Sp.z o.o. Sp.k.,
ul. T. Zana 4,
04-313 Warszawa.