

Diagnostic P1 Plus inhalator kompresowy tłokowy

Opis produktu

Diagnostic P1 Plus, inhalator kompresowy tłokowy to idealne rozwiązanie do zwalczania przeziębień, kataru, uciążliwego kaszlu, alergii, zapalenia oskrzeli, oskrzelików, zapalenia płuc i astmy. Posiada superwydajny kompresor tłokowy, przeznaczony do pracy ciągłej. Zatyczka i zwężka Venturiego umożliwiają regulację, lepsze i szybsze działanie rozpylacza. Inhalator wyposażony jest w selektor cząsteczek, który blokuje większe cząsteczki. Jedyne cząsteczki o skuteczności terapeutycznej przechodzą przez selektor. Aerodynamiczna kształtka zapewnia skuteczne rozpylanie, zwiększając ilość rozpylanego lekarstwa. Specjalny kształt ułatwia używanie rozpylacza w pozycji nachylonej, co pozwala na zastosowanie neutralizatora przez pacjentów leżących. Podziałka umożliwia precyzyjne dozowanie leku. Inhalator wyposażony jest w bogaty zestaw akcesoriów: maseczkę dziecięcą i maseczkę dla dorosłych, widelce nosowe duże i małe, ustnik, filtr powietrza.

Zastosowanie

- Służy do natychmiastowego i bezpośredniego dotarcia preparatu medycznego w formie wziewnej do oskrzeli i płuc.
- Zwalczania przeziębień, kataru, uciążliwego kaszlu, alergii, zapalenia oskrzeli, oskrzelików, zapalenia płuc, astmy.

Sposób użycia

- Uruchom inhalator, naciskając przycisk ON/OFF 2.
- Umieść ustnik w ustach lub dopasuj jedną z masek tak, aby objęły usta i nos.
- Podczas inhalacji, należy siedzieć prosto przy stole, aby uniknąć kompresji dróg oddechowych i osłabienia skuteczności leczenia.
- Po zakończeniu inhalacji w czasie zalecanym przez lekarza naciśnij przycisk ON/OFF 2, aby wyłączyć.
- Opróżnij zestaw inhalacyjny z pozostałego leku i wyczyść urządzenie.

Cechy produktu

- lekki i kompaktowy,
- wygodny w obsłudze,
- wydajny kompresor tłokowy,
- przeznaczony do pracy ciągłej,
- wyposażony w innowacyjny nebulizator z regulacją wielkości cząsteczek i możliwością pracy w przechyle,
- idealny do zwalczania przeziębień, kataru, uciążliwego kaszlu, alergii, zapalenia oskrzeli, oskrzelików, zapalenia płuc, astmy.

Specyfikacja techniczna

- waga: około 1,6 kg,
- warunki pracy: temperatura: $10^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$, wilgotność: $30 \div 75\%$,
- transport i przechowywanie: temperatura: $-40^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$, wilgotność: $10 \div 100\%$,
- ciśnienie robocze: 0,8 bar,
- prędkość rozpylania: 0,22 ml/min przy zamkniętej zatyczce,
- prędkość rozpylania: 0,37 ml/min przy otwartej zatyczce,
- regulacja rozpylania: w rozpylaczu,
- wielkość cząsteczek: 3,41 / 5,00 / 7,75 μm ,
- tryb pracy: przeznaczony do pracy ciągłej,
- pojemnik na lekarstwo: 8 ml,
- poziom hałasu: około 35 dB w odległości 1 m.

Gwarancja

- 5 lat na inhalator,
- 12 miesięcy na akcesoria do inhalatora.

Ostrzeżenia

- Nie należy leżeć podczas inhalacji.
- W razie gorszego samopoczucia należy przerwać inhalację.

Zawartość opakowania

- 1 x nebulizator,
- 1 x maska dla dzieci i dorosłych,
- 1 x ustnik,
- 1 x końcówka nosowa: mała i duża,
- 1 x przewód,
- 1 x zapasowy filtr,
- 1 x instrukcja obsługi.

Dodatkowe informacje

Przed pierwszym użyciem zalecamy oczyszczenie urządzenia.