

Irigasin zestaw do płukania nosa i zatok irygator + 12 saszetek

Opis produktu

Irigasin to wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok.

Zastosowanie

Ostre lub przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, nieżyt nosa w przebiegu infekcji lub alergii, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok, po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu, profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia: płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza. Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej. W celu przygotowania roztworu izotonicznego do [butelki](#) należy wsypać 1 saszetkę proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii 240 ml, przegotowaną, ostudzoną wodą. W celu przygotowania roztworu hipertonicznego do butelki należy wsypać 2 saszetki proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii 240 ml, przegotowaną, ostudzoną wodą. Do płukania należy używać wyłącznie butelki dostępnej z zestawie do płukania nosa i zatok. Do każdego

płukania stosować świeżo przygotowany roztwór.

Składniki

Chlorek sodu.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu. Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, uniemożliwiającej wydostanie się roztworu. Nie stosować w przypadku infekcji lub uczucia zatkania ucha. W przypadku przebytej operacji ucha przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej. Możliwość stosowania u dzieci poniżej 4 roku życia należy skonsultować z lekarzem. Nie stosować później niż na godzinę przed snem.

Ważne wskazówki

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice