

LH Ovumi test paskowy owulacyjny 5 sztuk

LH Ovumi Test owulacyjny paskowy – 5 pasków testowych

LH Ovumi Test owulacyjny paskowy dokładny, szybki i czuły w wykrywaniu hormonu LH

Paskowy test owulacyjny badający poziom hormonu luteinizującego, który wzrasta tuż przed najbardziej płodnym dniem w miesiącu.

Skutecznie wskaże najlepszy dzień do zajścia w ciążę:

Dokładny – dokładność testu wynosi 99,9%

Szybki – wynik w ciągu 5 minut

Czuły – wykrywa hormon LH o stężeniu 30 mIU/ml i powyżej

Zawartość opakowania:

5 pasków testowych

1 instrukcja używania wyrobu

Sposób użycia:

Wykonanie testu:

1. Wyznacz dzień rozpoczęcia badania.

2. Zanurz pasek testowy w badanym moczu do odpowiedniej głębokości.

3. Odczytaj wynik testu po 5 minutach

Przed wykonaniem testu zapoznaj się z instrukcją dołączoną do opakowania.