

Microlife NEB 200 inhalator kompresorowy

Inhalator kompresorowy MICROLIFE NEB 200 – 1 szt.

Opis

Inhalator kompresorowy NEB 200 to innowacyjny system nebulizacji umożliwiający szybkie i skuteczne leczenie całej rodziny. Urządzenie służy do rozpylania płynów i płynnych leków (aerozoli) do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych.

Aplikacja

Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych.

Sposób użycia

- Uruchom inhalator, naciskając przycisk ON/OFF 2.
- Umieść ustnik w ustach lub wyreguluj jedną z masek tak, aby zakryła usta i nos.
- Siedź prosto przy stole podczas inhalacji, aby uniknąć ucisku dróg oddechowych i zmniejszenia skuteczności leczenia.
- Po inhalacji, w czasie zaleconym przez lekarza, naciśnij przycisk ON/OFF 2, aby go wyłączyć.
- Usuń wszelkie pozostałości leku z zestawu do inhalacji i wyczyść urządzenie.

Cechy produktu

Microlife NEB 200 to inhalator przeznaczony dla całej rodziny do codziennego użytku. Jest to wygodne w obsłudze urządzenie o niewielkich gabarytach, co pozwala na łatwy transport i przechowywanie bez zajmowania zbyt dużej przestrzeni.

- Skrócony czas inhalacji,
- wysokowydajny nebulizator do krótkich inhalacji,
- nadaje się do wszystkich popularnych roztworów do inhalacji,
- łatwa obsługa jednym przyciskiem,
- akcesoria można myć i dezynfekować;
- szeroki kształt pojemnika na lek zwiększa ilość leku użytego w procesie nebulizacji,
- system Venturiego zasysa powietrze atmosferyczne, co dodatkowo zwiększa nebulizację szczura

Specyfikacja techniczna

- wydajność aerozolu: 0,40 ml/min. (NaCl 0,9%),
- frakcja respirabilna: 63%