

Tampony higieniczne OB **Origina Normal – 16sztuk**

Opis produktu

Tampony OB posiadają skręcone rowki ułożone wzdłuż tamponu. Technologię skręconych rowków opracowano, aby ulepszyć odprowadzanie krwi do wnętrza tamponu, gwarantując niezawodną ochronę.

Sposób użycia

Pierwszy krok to znalezienie dogodnej dla Ciebie pozycji. Może to być siedzenie na toalecie lub stanie z jedną stopą opartą na krawędzi wanny. Ostrożnie eksperymentuj, aby znaleźć swój sposób na najłatwiejszą aplikację tamponu. Możesz spróbować kilku różnych metod, aby znaleźć tę, która jest dla Ciebie najlepsza. Wsuń tampon palcem, umieszczając go w tylnej części pochwy. Jeśli tampon umieszczony jest prawidłowo – w środkowej części pochwy – nie będziesz go w ogóle czuć, ponieważ znajduje się tam stosunkowo niewiele nerwów czuciowych. Utrzymywany jest w poprawnej pozycji przez mięśnie pochwy i dna miednicy. Jeśli czujesz tampon, spróbuj go poprawić, wsuwając go nieco głębiej (spokojnie, nie zgubi się wewnątrz ciała). Jeśli nie możesz umiejscowić go poprawnie, spróbuj jeszcze raz.