

Pani Teresa Pas na ramię PT 0201 biały rozm. L – 1sztuka

PANI TERESA Pas na ramię PT 0201 biały rozm. L – 1 sztuka

Opis produktu

Pas na ramię PT 0201 Pani Teresa to wyrób medyczny przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób starszych wspomagający proces leczenia i rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami. Może być wielokrotnie stosowany w profilaktyce, do korygowania wad postawy, m.in. w przypadku okrągłej, wygiętej do tyłu klatki piersiowej w kształcie lejka. Skutecznie wymusza utrzymanie prawidłowej postawy, łagodzi zespoły bólowe, wspiera mięśnie pleców kręgosłupa. U osób dorosłych jest pomocny w przypadkach dyskopatii kręgosłupa piersiowego.

Pas zapinany jest na rzep, co pozwala na jego odpowiednie dopasowanie. Wykonany jest z lateksu i poliestru z dodatkiem elastylu i poliamidu.

Aplikacja

w profilaktyce,

do korekcji wad postawy, m.in. w przypadku okrągłych pleców, piersi w kształcie lejka,

do łagodzenia bólu.

Sposób użycia

Przystępując do zakładania pasa, odepnij rzepy i załóż szelki na ramiona tak, aby pasy skrzyżowały się na plecach.

Następnie zapnij rzep z przodu, odpowiednio regulując docisk.

Składniki

Lateks 50%, poliester 30%, elastan 15%, poliamid 5%.

Cechy produktu

wielokrotnego użytku,

pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, z zapięciem na rzep dla odpowiedniej regulacji,

Biały kolor,

rozmiar L jest odpowiedni dla osób o obwodzie klatki piersiowej 73-81 cm.

Ważne wskazówki

Dobór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania produktu. W celu prawidłowego dopasowania

rozmiaru należy zmierzyć obwód klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Dla kobiet zmierz obwód pod biustem.

Prawidłowe użytkowanie urządzenia może wymagać porady specjalistycznego personelu medycznego.

W okresie noszenia pasa zaleca się wykonanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Unikaj silnego zabrudzenia. Prac ręcznie w wodzie o temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych detergentów, np. do prania wełny. Nie prasować, nie chlorować.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Ostrzeżenia

Pasek nakładany bezpośrednio na skórę może powodować reakcje alergiczne, dlatego zaleca się zakładanie paska na bieliznę.

Ciągłe używanie pasa bez ćwiczeń może osłabiać mięśnie kręgosłupa.

Nie stosować bezpośrednio na rany, uszkodzoną lub chorą skórę.

Nie stosować w przypadku złego doboru rozmiaru.

W przypadku, gdy ból utrzymuje się lub nasila, a także w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, podrażnienia skóry lub innych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Zmieniła się szata graficzna opakowania. Stara wersja produktu zostanie wydana do wyczerpania zapasów.

Zawartość opakowania

1 kawałek