

# Protefix Protezowy krem □ utrwalający o smaku miętowym – 47g

## Protefix Protezowy krem □□utrwalający o smaku miętowym – 47g

### Opis produktu

Protefix Premium Fixing to krem □□przeznaczony do mocowania protez całkowitych i częściowych. Preparat gwarantuje komfort mocowania protez, uszczelnia i zapobiega wnikaniu cząstek pokarmu. Wyrób medyczny można stosować na mokrych protezach, dzięki elastycznej warstwie między dziąsłami a protezą. Zawarta w preparacie witamina E pielęgnuje dziąsła. Krem ma przyjemny, łagodny i świeży miętowy smak.

### Aplikacja

Krem przeznaczony do mocowania protez całkowitych i częściowych.

### Sposób użycia

Krem nanosić na mokrą lub suchą protezę w odstępach (krótkich odcinkach).

Nałóż protezę z kremem i dociskaj przez kilka sekund.

Odczekaj 5 minut przed spożyciem posiłku.

Po użyciu ostrożnie zamknij tubę.

### Składniki

Guma celulozowa (27%), kopolimer wapniowo-sodowy PVMMA (26%), parafina płynna, wazelina, krzemionka, rumianek recutita, octan toksoferylu, komiphora mirra, szałwia lekarska, mięta, mleczan, mięta chrupka, 14720.

### Cechy produktu

skutecznie uszczelnia,

jest mokry,

pielęgnuje dziąsła,

ma świeży smak mięty.

### Ważne wskazówki

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Wszelkie pozostałości kremu utrwalającego można łatwo usunąć ze szczęki, żuchwy i podniebienia wacikiem zwilżonym olejem spożywczym.

### Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników kremu utrwalającego.

Nie stosować w przypadku podrażnionej lub chorej błony śluzowej jamy ustnej.

Zawartość opakowania

47 gramów

Producent

Queisser Pharma GmbH & Co KG

Dział eksportu

Schleswiger Straße 74

24941 Flensburg