

Sopelek Aspirator bez nosa – 1sztuka

Sopelek Aspirator bez nosa – 1sztuka

Akcja produktu:

Pozwala na usunięcie wydzieliny z nosa dziecka podczas kataru. Dzięki temu dziecko może znowu swobodnie oddychać.

Regularne oczyszczanie nosa dziecka z kataru poprawia komfort dziecka i zmniejsza zachorowalność na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych.

Przeznaczenie:

Wyrób medyczny aspirator do nosa Sopelek polecany jest do oczyszczania nosa z wydzieliny u dzieci, które nie są jeszcze w stanie same oczyścić nosa.

Stosowanie:

Końcówkę z jednorazowym filtrem pochłaniającym nałożyć na główny cylinder aspiratora,

Delikatnie włożyć końcówkę do nozdrza dziecka i ustnik włożyć do ust,

Delikatnie, stopniowo i równomiernie wciągać powietrze przez ustnik,

Powtórz te kroki dla drugiego nozdrza,

Zdejmij brudną końcówkę z jednorazowym filtrem i wyrzuć ją.

Jeśli dziecko ma trudności z oddychaniem lub katar jest gęsty, przed odciąganiem wydzieliny można dodać do nosa kilka kropli roztworu izotonicznej soli morskiej lub soli fizjologicznej przeznaczonej do stosowania donosowego.

Zawartość zestawu:

Aspirator do nosa – cylinder główny z ustnikiem,

Wymienne, jednorazowe końcówki z filtrami – 3 szt.

Ważne uwagi i informacje:

Aby zachować higienę i zapobiec ponownemu zakażeniu:

Po każdym użyciu oparzyć główny cylinder z ustnikiem,

Zawsze używać nowych końcówek z filtrem chłonnym,

Przechowywać aspirator w suchym i czystym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Notatka:

Proces pobierania wydzieliny z nosa dziecka może wykonywać tylko osoba dorosła!

Opakowanie: 1 sztuka