

Tantum Rosa Irygator do higieny intymnej – 500ml

Tantum Rosa Irygator do higieny intymnej – 500ml

Irygator Tantum Rosa to wygodny pojemnik z aplikatorem do płukania pochwy i higieny intymnej o pojemności 500 ml, do wielorazowego użytku.

Irygator do higieny intymnej Tantum Rosa służy do wykonywania płukania pochwy. To pojemnik wielokrotnego użytku, pomocny w miejscowym stosowaniu roztworów dopochwowych.

Regularna higiena pochwy pomaga w zachowaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej pochwy i może odpowiednio uzupełniać zalecane przez lekarza leczenie stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych, wywołanych przez infekcje intymne, podrażnienie mechaniczne lub w profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii.

ZALECANE SPOŻYCIE

Irygator Tantum Rosa jest bezpieczny, wykonany z elastycznego i gładkiego plastiku.

Irygator może być użyty wielokrotnie.

Irygator przeznaczony jest do używania przez jedną kobietę.

Irygator dopochwowy jest przeznaczony do użytku indywidualnego.

Jak używać irygator do płukania pochwy?

1. Płyn do irygacji należy przygotować używając wody o

temperaturze ciała.

2. Należy napełnić zbiornik przygotowanym roztworem w ilości 500 ml.
3. Na zbiornik nakręcić końcówkę irygatora (aplikator).
4. Ostrożnie wprowadzić końcówkę irygatora (aplikator) do pochwy, najgłębiej jak jest to możliwe.
5. Zbiornik należy trzymać dwoma rękoma, kciuki należy ułożyć na korku przy końcówce irygatora (aplikatorze).
6. Naciskając zbiornik doprowadzić do jego opróżnienia.
7. Jeżeli jest to możliwe irygację należy wykonać w pozycji leżącej, najlepiej w pustej wannie, lub stojącej – np. pod prysznicem. Dla bezpieczeństwa i wygody zaleca się wykonanie irygacji w bezpiecznej i stabilnej pozycji, z ewentualnym wykorzystaniem wkładki antypoślizgowej. Można również wykonać irygację w pozycji siedzącej – na bidencie lub sedesie.
8. Delikatnie wyjąć końcówkę irygatora (aplikator) z pochwy nie dopuszczając do rozprężenia się zbiornika, aby nie wsysać do zbiornika wydzieliny z pochwy.
9. Ze zbiornika odkręcić końcówkę irygatora (aplikator).
10. Obie części umyć w ciepłej (do 40°C) wodzie i odstawić do osuszenia.

WAŻNE

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Uwaga – żadnej części irygatora nie należy myć w zmywarce.

Nie sterylizować.

Nie podgrzewać powyżej 40°C.

Nie stosować żrących środków do dezynfekcji.

Nie stosować roztworów środków drażniących oraz środków powierzchniowo czynnych (detergentów).

Kobiety, które nie rozpoczęły życia seksualnego nie powinny stosować irygatora, gdyż jego użycie może spowodować przerwanie błony dziewiczej.

SKŁADNIKI

Zawartość opakowania: 1 plastikowy zbiornik z korkiem oraz aplikator. Irygator ma pojemność 500 ml.

PRODUCENT

Dystrybutor w Polsce:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 181B

02-222 Warszawa

tel. (22) 70 28 200 | email: angelini@angelini.pl

Producent:

Pentaferte Italia S.r.l.

Viale Piane Nocella 23,

64012 Campli (TE), Włochy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu
lub zdrowiu.