

Termometr bezręciowy CR.W00 SilMed – 1sztuka

SilMed Termometr bezręciowy CR.W00 – 1 sztuka

Właściwości:

Przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych.

Bezpieczny i nietoksyczny – nie zawiera rtęci.

Dokładność 0,1stC.

Higieniczny – łatwa dezynfekcja.

Czytelna skala i lupa ułatwiająca odczytywanie wyników pomiaru temperatury.

Dwuczęściowe etui z końcówką ułatwiającą strząsanie.

Przyjazny dla środowiska – nie wymaga baterii.

Zakres pomiaru: 35-42stC.

Metody pomiaru: pod pachą, w ustach, w odbycie.

Czas pomiaru ok. 5 minut.

Sposób użycia:

Wyjmij termometr z opakowania/etui.

Przed użyciem upewnij się, czy słupek cieczy metalicznej w kapilarze znajduje się poniżej 36stC na skali pomiarowej.

Jeżeli nie, ciecz należy strząsnąć poniżej tej wartości.

Umyj i zdezynfekuj termometr.

Umieść termometr w miejscu pomiaru tak, ab końcówka pomiarowa bezpośrednio dotykała ciała. Czas pomiaru powinien wynosić około 5 minut.

Odczytaj wynik ze skali pomiarowej.

Zawartość opakowania:

Termometr – 1 sztuka

Etui z lupą powiększającą i uchwytem ułatwiającym strząsanie – 1 sztuka

Instrukcja używania – 1 sztuka

Termometr bezręciowy CR.W00 SilMed