

Test Pink domowy płytkowy test ciążowy super czuły – 1sztuka Domowe Laboratorium

Opis produktu

Test ciążowy Pink to test płytkowy do użytku domowego. Pink Test Super Czuły jest szybkim i wysoce czułym testem ciążowym służącym do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiety w ciąży. Czułość testu wynosi 10 mIU/ml. Zasada działania testu ciążowego oparta jest na reakcji hormonu hCG znajdującego się w moczu kobiety w ciąży z monoklonalnymi przeciwciałami anty – hCG, które zostały zaniesione na test. Wynik testu można odczytać już po czasie 1 do 4 minut od momentu zanurzenia końcówki testu ciążowego Pink w moczu.

Zastosowanie

Płytkowy test ciążowy.

Sposób użycia

- Pobierz do czystego pojemniczka poranny mocz.
- Otwórz plastikową kopertkę z testem.
- Końcówkę pipetki umieść w pobranym moczu i napełnij ją

poprzez naciśnięcie.

- Wprowadź do okienka na płytce testowej 3 kropli moczu.
- Po 5 minutach odczytaj wynik testu:
 - **wynik ujemny (brak ciąży):** wynik jest negatywny, gdy pojawia się pasek kontrolny C, natomiast brak paska testowego T.
 - **wynik dodatni (ciąża):** wynik jest pozytywny w momencie pojawienia się dwóch wyraźnych pasków na płytce testowej, a więc zarówno w strefie testowej T, jak i w strefie kontrolnej C. Intensywność barwy paska T lub C nie ma najmniejszego znaczenia. Taki wynik wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, że jesteś w ciąży. Aby potwierdzić ten stan, należy udać się do lekarza specjalisty.
 - **Wynik nieważny:** wynik możesz uznać za nieważny, jeżeli nie pojawi się żaden pasek lub wyświetli się jedynie prążek strefy testowej T. Wówczas najlepiej jest powtórzyć badanie, używając nowego testu ciążowego zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Cechy produktu

Czułość: 10 mIU/ml

Zawartość opakowania

Aluminiowa, szczelnie zamknięta kopertka, w której znajduje się:

- test ciążowy Pink,
- pipetka,
- środek pochłaniający wilgoć,
- instrukcja wykonania testu.

Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tomasza Zana 4
04-313 Warszawa