

Test Narkotykowy ze śliny

Domowe Laboratorium -1szt

Test Narkotykowy ze śliny Domowe Laboratorium – 1szt

OPIS PRODUKTU

Drug TEST ze śliny pozwala na wykrycie do 6 różnych substancji psychoaktywnych, w tym amfetaminy, kokainy, heroiny, morfiny, marihuany i haszyszu.

Test składa się z płytki testowej, próbnika i pojemnika na próbkę.

W celu wykonania badania należy pobrać ślinę z jamy ustnej za pomocą próbnika w postaci specjalnej gąbki. Następnie należy wycisnąć ślinę do pojemnika wyposażonego w nakrętkę z dozownikiem, z którego należy wprowadzić 3 krople śliny, w każde z dwóch pól reakcyjnych znajdujących się na płytce testowej.

WSKAZANIA

Test na obecność narkotyków w ślinie ma na celu jednocześnie wykrywanie w ślinie morfiny, heroiny, amfetaminy, marihuany, haszyszu i kokainy.

Test należy stosować, gdy nie wiadomo dokładnie, jaki lek był używany.

Badanie polega na pobraniu próbki śliny za pomocą specjalnego próbnika i pojemnika na próbkę, a następnie wprowadzeniu 3 kropli śliny do dwóch okrągłych okienek na płytce testowej.

Wynik testu w postaci kolorowych pasków odczytywany jest po 10 minutach.

AKCJA

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku dla jakiegokolwiek leku należy obserwować badanego i jego zachowanie.

Jeśli pozytywny wynik będzie się utrzymywał, należy skontaktować się z odpowiednią jednostką w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Wynik negatywny oznacza na ogół, że w badanej ślinie nie wykryto żadnych leków ani ich metabolitów.

Jednak otrzymanie wyniku negatywnego nie zawsze oznacza, że osoba, której zbadano ślinę, nie brała narkotyków.

Zawsze skontaktuj się z lekarzem przed podjęciem ważnych decyzji medycznych.

Pozostałe składniki testu można usunąć z domowych odpadów.