

Undofen Krioterapia w aerozolu do skóry – 50ml/12aplikacji

Undofen Krioterapia w aerozolu do skóry – 50ml/12aplikacji

Wyrób medyczny Undofen Krioterapia to prosty i skuteczny sposób leczenia brodawek. Preparat pozwala pozbyć się narośli tą samą metodą zamrażania, jaką stosują lekarze. Zapewnia natychmiastowe zamrożenie brodawek aż do nasady, w wyniku czego po kilku dniach stopniowo zanikają lub całkowicie odpadają, odsłaniając zupełnie nowy i zdrowy naskórek. Wyrób medyczny Undofen Krioterapia uznawany jest za numer 1 w Polsce wśród domowych metod leczenia brodawek.

Krioterapia Undofen – zalety stosowania

Wyrób medyczny na brodawki Undofen Krioterapia pozwala samodzielnie usunąć brodawki w zaciszu własnego domu, bez konieczności udawania się do lekarza – zazwyczaj jeden zabieg pozwala na jej całkowite usunięcie.

Zamrożenie brodawek powoduje ich odpadnięcie po 10-14 dniach od aplikacji preparatu, a zestaw 12 jednorazowych aplikatorów zabezpiecza przed przeniesieniem wirusa HPV.

Preparat na brodawki można stosować u dzieci od 4 roku życia. Nadaje się do usuwania brodawek na dłoniach i stopach.

STOSOWANIE

Wart Remedy Undofen Krioterapia usuwa różne rodzaje brodawek.

0 ile mniejsze brodawki można zlikwidować już po pierwszym zabiegu, o tyle duże mogą wymagać więcej niż jednej aplikacji preparatu.

Jeśli zamrożenie brodawek nie powiedzie się za pierwszym razem i brodawka nie zniknie po 10-14 dniach, można bezpiecznie powtórzyć zabieg. Ale strzeż się! Aplikator piankowy może być użyty tylko raz i należy go wyrzucić.

Preparat na brodawki Undofen Krioterapia nie może być stosowana w miejscach, gdzie skóra jest cienka lub wrażliwa, takich jak: twarz, szyja, pachy, piersi, pośladki i genitalia. Nie należy go stosować na podrażnioną skórę lub obszary zakażone, zaczerwienione lub wykazujące jakiekolwiek oznaki stanu zapalnego. Preparatu nie można stosować na owłosione brodawki, znamiona, ciemne pieprzyki oraz na skórę ze zmienionym kolorytem.

Przed zabiegiem dobrze jest najpierw namoczyć skórę w ciepłej wodzie przez około 5 minut, a następnie pilnikiem do paznokci zetrzeć zrogowaciały naskórek w okolicy sutków. Aby wykonać zabieg, umieść aplikator w piance w uchwycie. Następnie aplikator trzymany za rączkę wcisnąć do puszkę z aerozolem na 3 sekundy i odczekać 20 sekund po nasyceniu piany, aby jeszcze bardziej obniżyć temperaturę. Na koniec nałóż białą końcówkę aplikatora piankowego na brodawkę.

w przypadku brodawek pospolitych: przytrzymać aplikator przez 20 sekund

na brodawki stóp: przytrzymać aplikator przez 40 sekund

Kiedy aplikator piankowy zostanie przyłożony do brodawki, skóra może stać się biała i może wystąpić lekki ból i pieczenie w odpowiedzi na zamrożenie. Gdy aplikator zostanie usunięty, powróci prawidłowy kolor skóry. Uczucie pieczenia i lekki ból natychmiast ustąpią.

KOMPOZYCJA

Krioterapia Undofen to zestaw składający się z:
pojemnik aerozolowy o pojemności 50 ml, zawierający przyjazną dla środowiska mieszaninę eteru dimetylowego i propanu CE 0344,

12 jednorazowych aplikatorów piankowych (do 12 aplikacji),
uchwyt na aplikator piankowy wielokrotnego użytku,
pilnik do paznokci wielokrotnego użytku CE
ulotka informacyjna

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu .

Undofen Krioterapia w aerozolu do skóry – 50ml/12aplikacji