

Wartix do usuwania kurzajek z dłoni i stóp aerozol – 38ml/15dawk

Wartix do usuwania kurzajek z dłoni i stóp aerozol – 38ml/15dawk

Wartix® jest środkiem do wymrażania kurzajek z rąk i stóp w warunkach domowych. Oparty na najskuteczniejszej metodzie szybkiego wymrażania kurzajek stosowanej przez lekarzy.

DZIAŁANIE

Skuteczny – wystarczy jednokrotne użycie, kurzajka ulega wymrożeniu w 10 sekund

Przyjazny dla dzieci – działa szybko i pozwala uniknąć zbędnego bólu

Bezpieczny – posiada mechanizm samoczynnego odmierzania dawki

Łatwy w użyciu – innowacyjny aplikator bezpośrednio gotowy do użycia

SPOSÓB UŻYCIA

Zwrócić kurzajkę ku górze tak, aby zmieściła się w komorze aplikatora (skierowanego ku dołowi). Następnie przyłożyć aplikator tak, by krawędzie komory szczelnie przylegały do skóry wokół kurzajki. Trzykrotnie przycisnąć dozownik kciukiem, aby uwolnić płyn zamrażający. Przytrzymać aplikator na kurzajce przez co najmniej 10 sekund. Zdjąć aplikator z kurzajki. Bezpośrednio po aplikacji można odczuwać nadwrażliwość skóry lub mrowienie. W większości przypadków do usunięcia kurzajki wystarczy pojedyncza aplikacja. W przypadku

uporczywych kurzajek należy powtórzyć aplikację po 10 sekundach. Jeżeli kurzajka nie odpadnie w ciągu 14 dni od wymrażania, należy powtórzyć aplikację zgodnie z instrukcją użycia.

SKŁAD

Postać: Aerosol 38 ml, 15 dawek. Zawartość dozownika: DME (dimetyloeter).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wartix do usuwania kurzajek z dłoni i stóp aerosol – 38ml/15dawek